

Gebruiksaanwijzing Clappy

Vorbereiding

Zorg dat je met je lichaam dicht bij de Clappy staat, zodat je stabiel kan werken.




➤ STAP 1

Trap het voetpedaal in, zodat de sluitmond opent. Houd met je voet het pedaal ingedrukt.




➤ STAP 2

Breng een lege afvalzak via de bovenkant van de Clappy in. **Vouw de zijanten van de afvalzak om de sluitmond** van de Clappy.

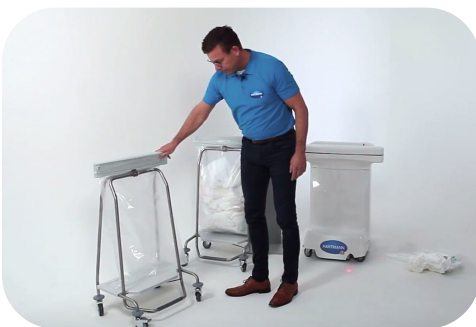

➤ STAP 3

Laat het voetpedaal los. De zak vormt zich nu vanzelf, volledig om de sluitmond heen.

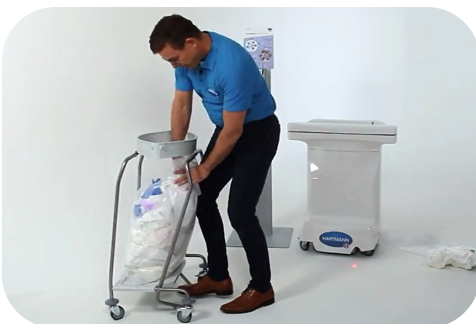

➤ STAP 4

Verwijder de afvalzak door de sluitmond via het voetpedaal te openen. **Maak de afvalzak los en pak de volle afvalzak onderhands aan**.